

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Набор для отбеливания зубов.

Раствор карбионида диоксида 16%. Раствор для наружного применения.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Карбионид диоксид 16% в тубе и 2 полиуретановые прозрачные капы — для верхней и нижней челюсти.

ПРИМИНИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Отбеливает эмаль зубов.
Зубы на долгое время сохраняют свою белизну.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Пожелтевшая эмаль зубов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повреждения слизистой, воспалительные зубные процессы, парадонтоз, кариес, повышенная чувствительность к компонентам, истонченная или чувствительная эмаль зубов.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Первый курс применения может нести легкую блуждающую боль. Передозировка геля приводит к более активному воздействию на эмаль и может появиться повышенная чувствительность зубов (реакция на горячее и холодное).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Вскипятите воду, дайте ей немного остыть (приблизительно до 80-70° C). Поместите капю в остывшую воду на 15-20 секунд, держа ее за выступ. Выньте капю из воды и наденьте на верхнюю или нижнюю челюсть соответственно.

Прижмите капю пальцами к зубам, чтобы придать ей форму вашей челюсти.

Нанесите небольшое количество геля внутрь каждой капы.

Наденьте капы на зубы, прижмите их пальцами для плотной посадки на форму зуба.

Рекомендуется носить капы 1 час перед сном.

Внимание! Если опустить капю в кипящую воду, то она может деформироваться.

Поэтому важно опускать капю в воду температурой примерно 80-70° C.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Во время процедуры отбеливания рекомендуется снизить потребление в пищу красящих продуктов, таких как свекла, черника, чай, кофе, красное вино.

После курса процедур первые трое суток необходимо полностью исключить из рациона красящие продукты и напитки. И максимально ограничить курение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом, прохладном, проветриваемом месте. Держите подальше от детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года.

В открытом виде средство можно хранить 6-8 месяцев.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.014.E.003655.06.12
От 01.06.2012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Almea Ltd
2nd Floor Queens House, 180 Tottenham Court Road
London W1T 7PD, UK

ПОСТАВЩИК:

ООО «Алмеа», 191186, Санкт-Петербург, Думская дом 9, лит. А, пом. 2-Н